

test.zmdx.at

SARS-CoV-2 PCR TEST

MIT MUND- RACHENSPÜLLÖSUNG
ZUR EIGENANWENDUNG

ANLEITUNG

 ZENTRUM FÜR
MOLEKULARE
DIAGNOSTIK



Ablauf der Testungen



test.zmdx.at



1



ONLINE REGISTRIEREN

Registrierung auf test.zmdx.at.
Persönliche Daten vervollständigen.



2



PCR TEST GRATIS ABHOLEN

„PCR-Gurgeltest abholen“ in der
WebApp abrufen und bestätigen.
Abholbestätigung in einer
teilnehmenden Filiale/Apotheke
an der Kassa vorweisen.



PCR Test mit nach
Hause nehmen.

3



GURGELN NACH ANLEITUNG

Test unter Videoaufzeichnung
durchführen.

4



PROBE VERPACKEN

Nach erfolgter Testung
die Probenentnahme samt Zellstoff
in den Schutzbeutel geben.
Gebrauchsanleitung aufbewahren.



5



PROBE ABGEBEN

Schutzbeutel samt Probe
in die Abwurfbox der teilnehmenden
Filiale/Apotheke werfen. Laboraus-
wertung erfolgt innerhalb von 24h ab
Probenabholung (siehe Abwurfbox).



6



ERGEBNIS ABRUFEN

Ergebnis per SMS erhalten.
Das offizielle Covid-19-Zertifikat*
kann über den Link in der
SMS abgerufen werden.
*Nur bei gültiger Identifikation

SARS-CoV-2 PCR TEST

MIT MUND- RACHENSPÜLLÖSUNG
ZUR EIGENANWENDUNG

PCR Test Kit


- 1 Kochsalzlösung
- 2 Transferröhrchen
- 3 Probenröhrchen
- 4 Schutzbeutel
- 5 Zellstoff
- 6 PCR Test Verpackung
- 7 Gebrauchsanweisung



WebApp Portal



Registrierungsportal:
QR-Code scannen oder
zum Link: test.zmdx.at

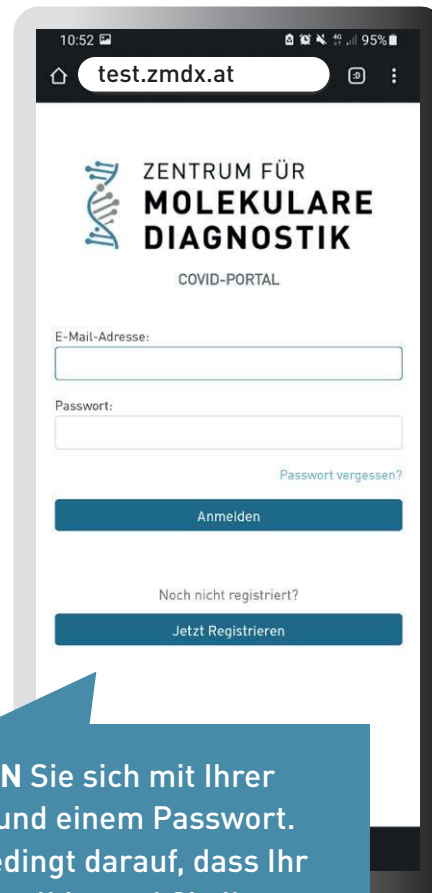

10:52 test.zmdx.at 95%

ZENTRUM FÜR MOLEKULARE DIAGNOSTIK
COVID-PORTAL

E-Mail-Adresse:


Passwort:

[Passwort vergessen?](#)

Anmelden

Noch nicht registriert?
Jetzt Registrieren

REGISTRIEREN Sie sich mit Ihrer E-Mailadresse und einem Passwort. Achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr Postfach nicht voll ist und Sie Ihre E-Mailadresse richtig schreiben.

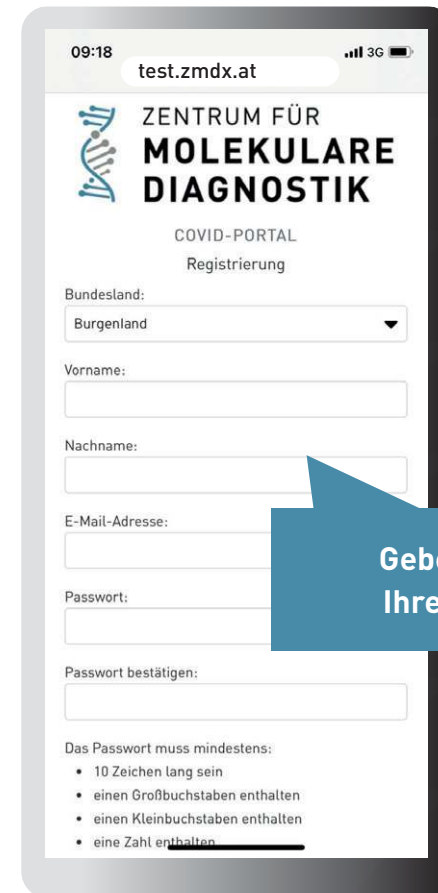

09:18 test.zmdx.at 3G

ZENTRUM FÜR MOLEKULARE DIAGNOSTIK
COVID-PORTAL
Registrierung

Bundesland:
Burgenland

Vorname:

Nachname:

E-Mail-Adresse:



Passwort:

Passwort bestätigen:


Das Passwort muss mindestens:

- 10 Zeichen lang sein
- einen Großbuchstaben enthalten
- einen Kleinbuchstaben enthalten
- eine Zahl enthalten



Geben Sie hier Ihre Daten an.

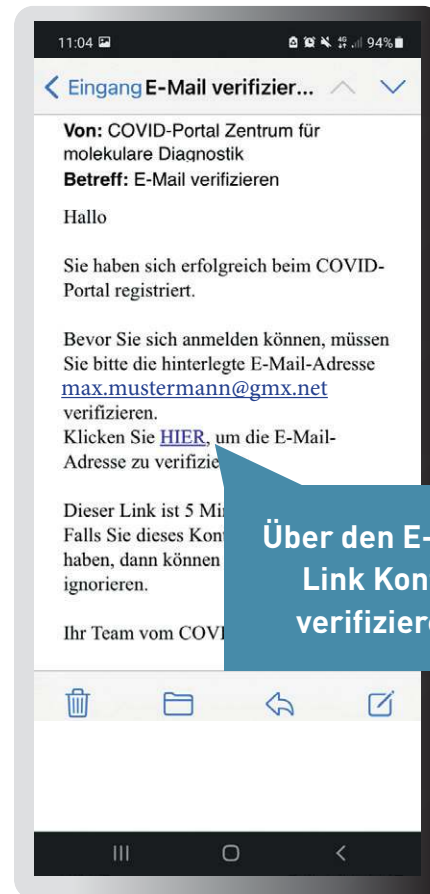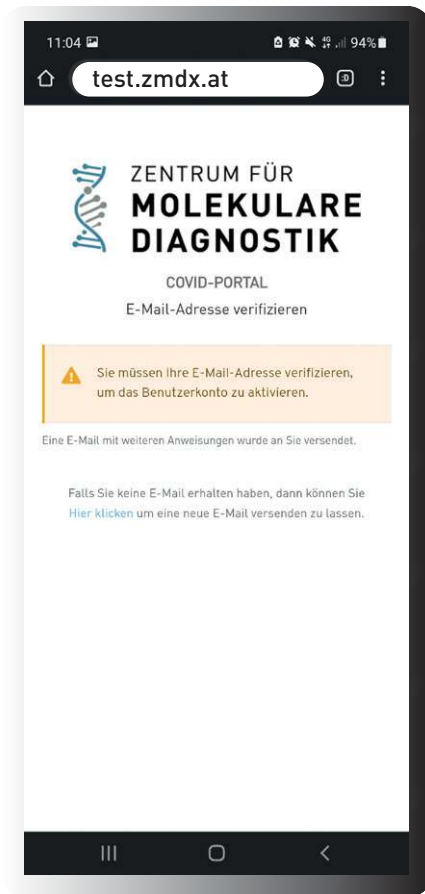



Über den E-Mail Link Konto verifizieren

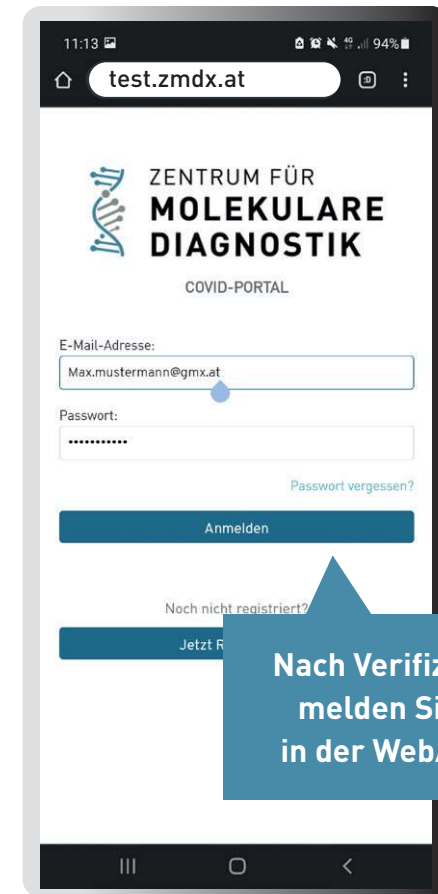

Nach Verifizierung, melden Sie sich in der WebApp an.

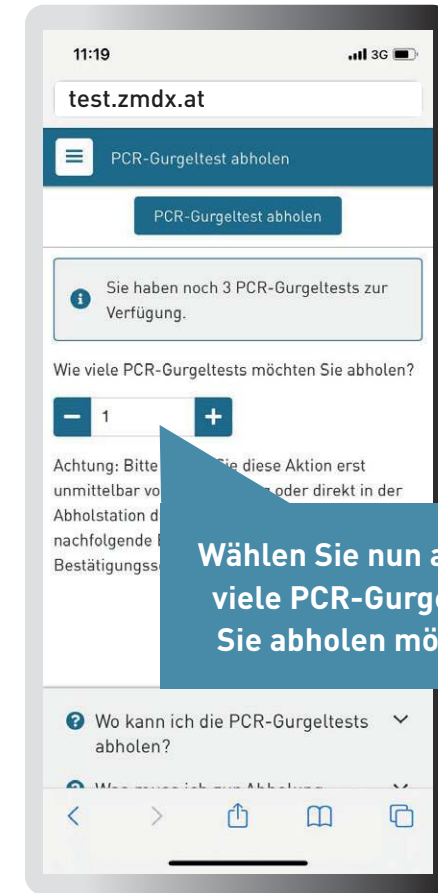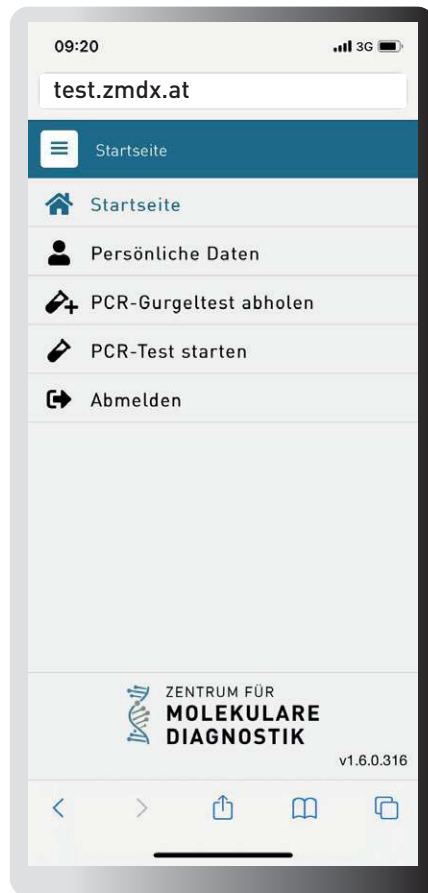

Wenn Sie weitere Personen hinzufügen möchten, können diese unter „Neue Person hinzufügen“ ergänzt werden.

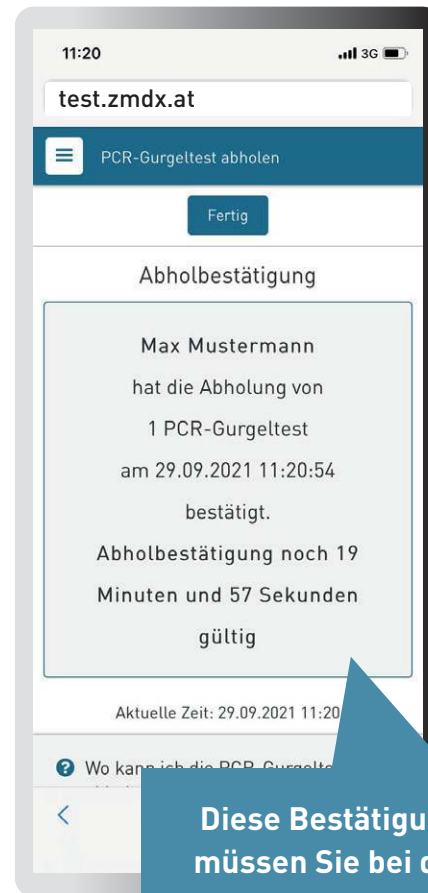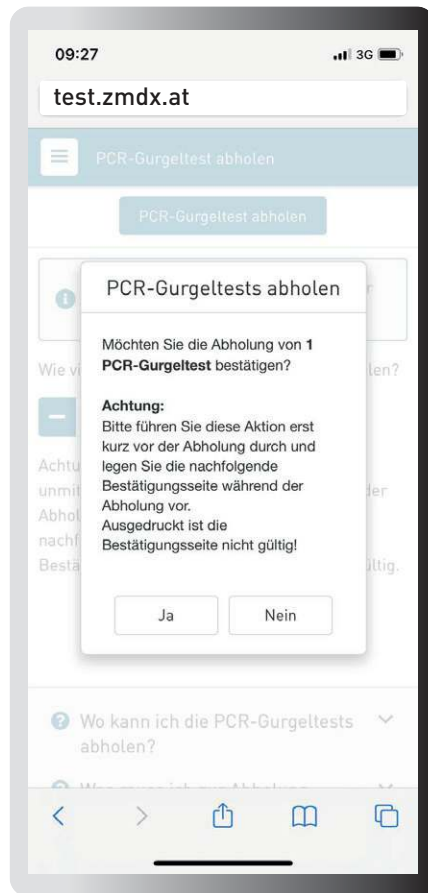

Diese Bestätigung müssen Sie bei der Abholung vorweisen.



Gehen Sie nun auf PCR-Test starten.

Probe aktivieren

Geben Sie die Probennummer vollständig ein. Bei Durchführung mittels Mobiltelefon oder Endgerät mit Kamera, können Sie die Probennummer auch abschnappen. Hierzu klicken Sie bitte auf die blaue Schaltfläche „Scannen“. Die Probennummer finden Sie auf dem Probenröhrchen, welches im Testkit enthalten ist.

Nach Eingabe der Probennummer können Sie die Daten der zu testenden Person eingeben. Führen Sie dann den Test durch. Bei mehreren Personen, bitte diesen Schritt erneut starten und nacheinander registrieren.

Probennummer: *

GA000950015

Wo kann ich die PCR-Gurgeltests abholen?

Aktivieren Sie hier die Probennummer des vorliegenden Gurgeltestkits.

09:36

test.zmdx.at

PCR-Test starten

Weiter >

Jetzt wird gegurgelt

Bitte gehen Sie auf PCR-Gurgeltest starten um den Test vor der Kamera zu beginnen.

Der Test wird wie folgt ablaufen:

- 1 Öffnen Sie die Kochsalzlösung, nehmen Sie diese vor der Kamera in den Mund und spülen/gurgeln Sie damit mindestens 1 Minute gründlich.
- 2 Nehmen Sie das Transferröhrchen und spucken Sie damit die gespülte Kochsalzlösung in das geöffnete Probenröhrchen.
- 3 Anschließend verschließen Sie das Probenröhrchen mit der Kappe.

PCR-Gurgeltest starten

Gehen Sie nun auf PCR-Gurgeltest starten.

11:20

test.zmdx.at

PCR-Test starten

Fertig

Verpacken 4


Probe verpacken

Fast geschafft!


- Geben Sie das verschlossene Probenröhrchen in den Schutzbeutel.
- Achten Sie darauf, dass sich der Zellstoff im Schutzbeutel befindet.
- Verschließen Sie nun nun den Schutzbeutel gut.

Um den Test final abzuschließen, unbedingt „FERTIG“ anklicken.


Anleitung Testung

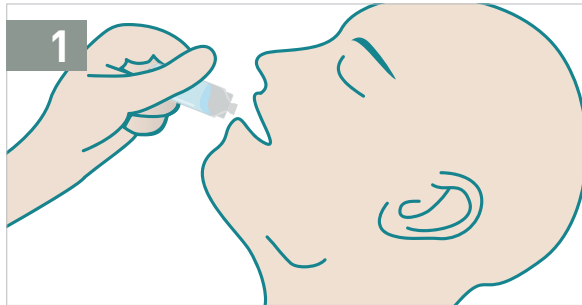


1. Öffnen Sie die Kochsalzlösung nehmen Sie diese in den Mund und spülen/gurgeln Sie damit mindestens 1 Minute gründlich.

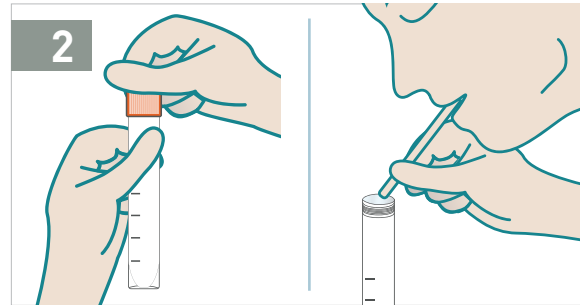

2. Öffnen Sie das Proberöhrchen. Nehmen Sie das Transferröhrchen und spucken Sie damit die gespülte Kochsalzlösung in das Probenröhrchen.

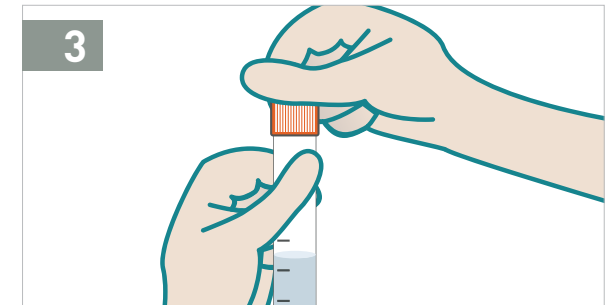

3. Verschließen Sie das Probenröhrchen samt Probe mit der Kappe.

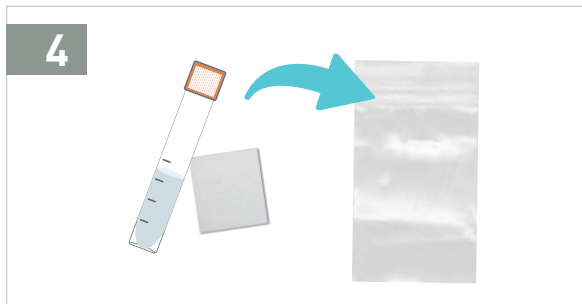

4. Geben Sie das Probenröhrchen mit dem Zellstoff in den Schutzbeutel. Verschließen Sie nun den Schutzbeutel gut.



5. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung mit Ihrer Probennummer sicher auf und geben Sie diese keinesfalls mit in den Schutzbeutel.



6. Bringen Sie den Schutzbeutel samt Probe umgehend nach Probenentnahme zu einer möglichen Abgabestelle. Siehe WebApp.